

NL ACUVUE™ RevitaLens Desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof

Uitstekend desinfectiemiddel voor langdurig comfort

Belangrijk – Lees deze bijsluiters aandachtig door en bewaar deze als naslagwerk voor later gebruik.

ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof reinigt, spoelt, desinfecteert, bewaart, verwijdert aanslag op het oppervlak, inclusief lipiden en eiwitten, en her-bevochtigt zachte (hydrofiele) contactlenzen.

Zorg voor uw contactlenzen met ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof.

AANWIJZINGEN VOOR HET DESINFECTEREN VAN CONTACTLENZEN —

1. Was uw handen met zeep en warm water en droog ze af met een pluisvrije handdoek om de kans op infectie te verminderen.
2. Na het verwijderen van uw contactlenzen, reinigt en desinfecteert u uw lenzen door 3 of meer druppels van de vloeistof op één zijde van het lensoppervlak aan te brengen.
3. WRIJF de lens voorzichtig in een niet-cirkelvormige beweging van het midden naar de randen gedurende 2 tot 4 seconden.
4. Draai de lens om en herhaal stap 2 en 3.
5. SPOEL beide kanten van de lens gedurende 5 seconden met verse vloeistof. Plaats de lenzen in een schone lenshouder en vul deze met vloeistof. Sluit de houder stevig.
6. WEEK de lenzen minimaal 6 uur om ze te desinfecteren, reinigen en eiwitaanslag te verwijderen.

Desinfectievloeistof:

- Leg de lenzen in de juiste kamers van de lenshouder (blauw voor links - wit voor rechts).
- Vul beide kamers met verse ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof. Plaats het deksel opnieuw op de lenshouder en laat gedurende ten minste 6 uur weken voor desinfectie, verwijdering van eiwitten en lipiden.

Nu zijn uw lenzen klaar om te dragen. Spoel de lenshouder met de ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof en laat deze aan de lucht drogen.

Let Op: U mag uw lenzen tot 30 dagen in de ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof in de ongeopende lenshouder laten. Na 30 dagen moet het reinigen en desinfecteren worden herhaald voordat u uw lenzen indooft.

Intensieve reiniging: Tijdens het reinigen en desinfecteren verwijdert ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof eiwitaanslag van uw lenzen. Dit helpt uw lenzen soepel te houden voor een optimaal draagcomfort. Indien het om een ongewoon grote mate van eiwitaanslag gaat, is het mogelijk dat een intensievere reinigingsprocedure van eiwitten noodzakelijk is. Uw contactlensspecialist zal u vertellen of u tabletten nodig hebt voor het verwijderen van eiwitaanslag.

WAARSCHUWINGEN:

U dient alle aanwijzingen te volgen. Als u dit niet doet, kunt u een ernstige ooginfectie of letsel oplopen. Als oogirritatie optreedt, neem dan onmiddellijk de lenzen uit en raadpleeg uw contactlensspecialist.

Stop ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof niet direct in uw oog.

Voorzorgsmaatregelen:

Algemeen: Gebruik de ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof met zachte contactlenzen, inclusief silicone hydrogel lenzen.

Gebruik geen ander lens-verzorgingssysteem zonder uw contactlensspecialist om advies te vragen.

Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen.

Uw lenzen niet langer dragen dan voorgeschreven is.

Alle lenzen die beschadigd of uitgedroogd zijn weggooien.

Het gebruik van spuitbussen vermijden tijdens het dragen van contactlenzen.

Ga regelmatig op controle bij uw contactlensspecialist.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Gebruik: Gebruik ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof altijd met de ACUVUE® lenshouder die in de verpakking wordt meegeleverd.

Het product niet gebruiken wanneer het veiligheidszegel ontbreekt of wanneer deze verbroken is.

Altijd verse contactlensvloeistof gebruiken.

Altijd uw lenzen gedurende ten minste 2-4 seconden handmatig wrijven met de contactlensvloeistof voordat u ze weekt.

Niet zwemmen, douchen en geen bad nemen terwijl u contactlenzen draagt.

Geen speeksel gebruiken en uw lenzen niet in uw mond nemen om ze opnieuw te bevochtigen.

Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken.

Om besmetting te voorkomen, mag de tip van de fles geen enkel oppervlak aanraken en niet in contact komen met het oog.

De contactlensvloeistof niet inslikken.

De lenzen/lenshouder niet met kraanwater spoelen of bewaren.

Bewaren: De fles onmiddellijk na gebruik goed sluiten.

Bewaren tussen 5 °C tot 25 °C.

Weggoien en vervalddatum: Gebruiken vóór de vervalddatum op het etiket en de doos.

Resterende contactlensvloeistof 90 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooien

Resterende contactlensvloeistof in uw lenshouder weggooien voordat u uw lenzen opnieuw desinfecteert.

Altijd uw oude lenshouder weggooien en de nieuwe meegeleverde lenshouder gebruiken.

Product: ACUVUE™ RevitaLens desinfecterende multifunctionele contactlensvloeistof

Bestanddelen: Alexidine 0,00016%, polyquaternium-1 0,0003%, boorzuur, natriumboraat-decahydraat, TETRONIC 904, ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA), trinitriumcitraat dihydraat, natriumchloride en gezuiverd water.

Dit product bevat geen ftalaten. Dit product bevat geen BPA.

Symbolen



Steriel-Aseptische techniek

