


# Handleiding

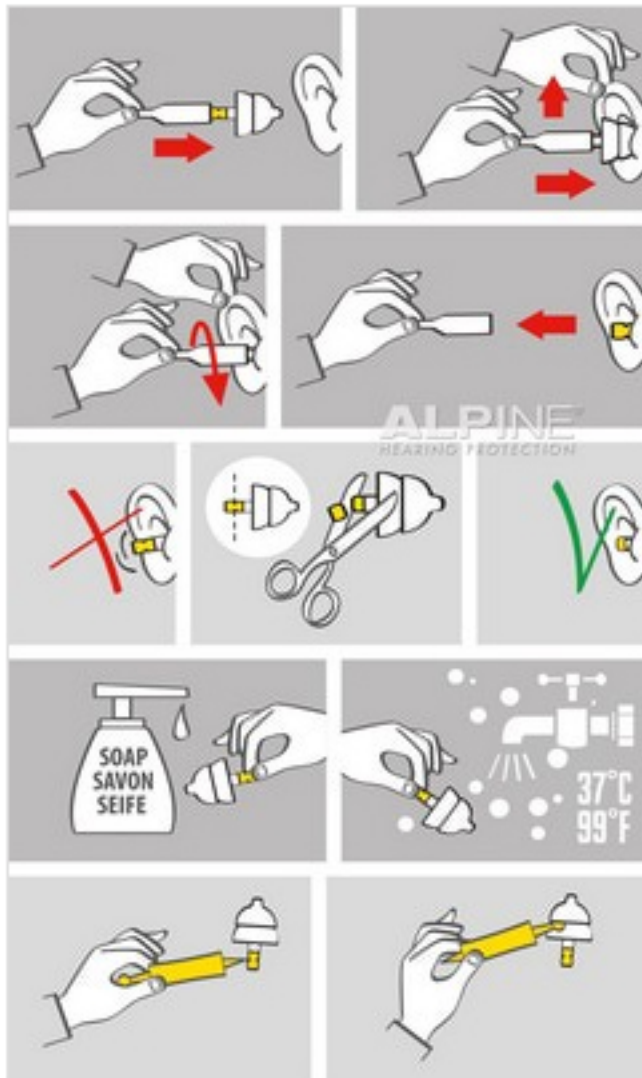

## Hoe doe je FlyFit oordopjes in?

1. Schuif de inbrenghuls over de steel van de oordop;
2. Trek het oor zachtjes een beetje omhoog en plaats de oordop in het oor;
3. Maak een draaiende beweging met de inbrenghuls totdat de oordop goed aansluit;
4. Trek de inbrenghuls voorzichtig van de oordop af.

## Steekt het oordopje te ver uit je oor?

Knip een kleine stukje van het steeltje af. Zorg dat je daarbij maximaal de helft van het gele gedeelte (het filter) afknijpt.

## Reinigen & levensduur

Alpine FlyFit oordopjes gaan langer mee als ze goed worden gereinigd. Dit kan met **Alpine Clean** of met water en zeep.

1. Reinig de oordopjes met zeep;
2. Spoel ze daarna met warm water goed af.

## Cleaner

1. Maak met de puntige kant van de Cleaner het filter schoon;
2. Maak met de kant met het schepje de lamellen en de opening van de oordop schoon.