

## **Bausch & Lomb ReNu® MPS™ Multi-Purpose Solution**

Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie. Graag zorgvuldig lezen voor toekomstig gebruik.

BAUSCH & LOMB ReNu® MPS™ Multi-Purpose Solution is een steriele gebufferde, isotone vloeistof, voor het dagelijks reinigen, afspoelen, desinfecteren, bevochtigen en bewaren van alle zachte contactlenzen. De unieke en steriele formule van ReNu® MPS™ Multi-Purpose Solution bevat poloxamine en DYMED® voor schone en comfortabele lenzen.

**INHOUD:** Een steriele vloeistof met boorzuur, edetate disodium, sodium boraat en sodium chloride;  
DYMED® (polyaminopropyl biguanide) 0.00005% , poloxamine 1%.  
BEVAT GEEN CHLOORHEXIDINE EN THIOMERSAL.

**GEBRUIKSAANWIJZING:** Was altijd eerst uw handen voordat u uw lenzen of ogen aanraakt. Voor een volledige dagelijkse verzorging dienen uw lenzen zorgvuldig gereinigd, afgespoeld en gedesinfecteerd te worden.

Om uw lenzen grondig te reinigen en te desinfecteren dient u altijd de volgende stappen te volgen wanneer u de lenzen verwijdert:

**Stap 1:** Plaats de lens in de palm van uw hand en doe enkele druppels **ReNu MPS** Multi-Purpose Solution op de lens. Wrijf de lens gedurende 20 seconden aan beide kanten voorzichtig heen en weer met uw wijsvinger. Het is niet nodig om een apart reinigingsmiddel te gebruiken.

**Stap 2:** Spoel de lens zorgvuldig af met verse Bausch & Lomb **ReNu MPS** Multi-Purpose Solution om de losgewreven vuildeeltje te verwijderen.

**Stap 3:** Plaats de lens in de juiste houder. De lens dient volledig in de verse **ReNu MPS** Multi-Purpose Solution te worden ondergedompeld. Laat de lenzen de gehele nacht of tenminste vier uur in de Bausch & Lomb ReNu® MPS™ Multi-Purpose Solution liggen. Bewaar uw lenzen tot het moment van gebruik in een afgesloten lenshouder, met een maximum van 30 dagen.

Verwijder uw lenzen uit de lenshouder en zet ze in. Gooi de Bausch & Lomb ReNu® MPS™ Multi-Purpose Solution uit de lenshouder weg en spoel deze af met verse ReNu® MPS™ Multi-Purpose Solution. Laat de lenshouder aan de lucht drogen met de deksels eraf. Draai de deksels er weer op. De lenshouder is klaar voor een volgend gebruik.

**EXTRA VERZORGING:** Het gebruik van een enzymatische reiniger, om proteïne te verwijderen, kan soms noodzakelijk zijn. Raadpleeg uw contactlensspecialist.

**BELANGRIJK:**

- Volg de instructies van uw contactlensspecialist nauwkeurig op. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstige ooginfecties.
- Gooi na elk gebruik de Bausch & Lomb ReNu® MPS™ Multi-Purpose Solution uit de lenshouder weg.
- Indien u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Bausch & Lomb ReNu® MPS™ Multi-Purpose Solution, dit product niet gebruiken.
- Gooi 6 maanden na opening de resterende vloeistof weg.
- Opgebruiken voor einde houdbaarheidsdatum, zie fles en doos.
- Raak de top van de fles niet aan met vingers of oog, hierdoor kan de vloeistof bedreven. Sluit de fles na gebruik goed af.
- Gebruik dit product niet in combinatie met oogheelkundige medicijnen, tenzij onder medische begeleiding.
- Gebruik Bausch & Lomb ReNu® MPS™ Multi-Purpose Solution niet voor de thermische desinfectiemethode.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Indien irritatie of overmatig tranen optreedt, aanhoudt of verergert of indien het gezichtsvermogen verslechtert, staak het gebruik en raadpleeg uw contactlensspecialist.