



Gebruiksaanwijzing

Garanties van Barnaux

1. Veiligheid

De producten van Barnaux voldoen aan strenge eisen teneinde een veilige, optimale lensverzorging te kunnen garanderen. De kwaliteitseisen van Barnaux voldoen aan de normen van ISO 9001/EN 46001. Alle producten zijn voorzien van een CE-nummer, overeenkomstig de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

2. Doeltreffendheid

Alle producten van Barnaux zijn uitvoerig getest en beoordeeld op een doeltreffende lensverzorging. Daarom worden uitsluitend bestanddelen toegepast, waarvan de effectieve werking bewezen is.

3. Steriliteit

Alle vloeistoffen worden bij aankoop steriel afgeleverd. Omdat lenzen op de ogen gedragen worden is het belangrijk dat lenzen met steriele producten worden verzorgd. Waar mogelijk vermijdt Barnaux het gebruik van conserveermiddelen.


Lees en bewaar deze bijsluiter zorgvuldig. Een juist gebruik van het MonoSept-systeem is van belang voor, uw lenzen en ogen.

Met het MonoSept-systeem verzorgt u op een veilige en gemakkelijke wijze uw lenzen. Dit systeem bevat geen conserveermiddelen. De MonoSept-vloeistof desinfecteert uw lenzen. De platina schijf, die aan uw lenshouder vastzit, draagt zorg voor de neutralisatie van de MonoSept-vloeistof. Na de neutralisatie-cyclus kunnen de lenzen weer gedragen worden.

Het EYEEYE MonoSept-systeem kan ook gebruikt worden in combinatie met proteïne-verwijderingstabletten, zoals EYEEYE 3-N-Zym tabletten.

⚠ GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Was eerst zorgvuldig uw handen, voordat u uw lenzen uit de ogen of uit de houder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek.
2. Plaats uw linkerlens in het met "L" gemarkeerde bolvormige korfje van de lenshouder. Sluit vervolgens het korfje.
3. De rechterlens in het rechterkorfje plaatsen en vervolgens sluiten.
4. Vul dan de EYEEYE MonoSept-lenscup met EYEEYE MonoSept-vloeistof tot de streep.
Belangrijk: Let goed op dat niet teveel of te weinig vloeistof gebruikt wordt. Bij overvulling kan de vloeistof overschieten; bij te weinig vloeistof bestaat kans op onvolledige desinfectie. Gebruik altijd verse vloeistof bij iedere desinfectiecyclus.
5. Plaats vervolgens de lenshouder in de lenscup en draai deze vast. De lenscup niet schudden. Door het schudden kunnen resten waterstofperoxide zich hechten aan de binnenkant van de deksel. Bij het inzetten van de lenzen kunnen deze resten een sterk branderig of prikkend gevoel veroorzaken. In dit geval direct de ogen spoelen met veel en schoon water.
6. Vervolgens de lenzen gedurende minstens 6 uren - of, bij voorkeur, gedurende de gehele nacht - in de vloeistof laten staan.
7. Neem uw lenzen uit de lenshouder. De lenzen kunnen nu ingezet en gedragen worden. Het is aan te bevelen voor het inzetten van HP lenzen, de lenzen met EYEEYE Saline af te spoelen.
8. Gooi de gebruikte vloeistof altijd direct weg. Vervolgens de lenscup, de lenshouder en de platina schijf goed met EYEEYE Saline of EYEEYE MonoSept-vloeistof afspoelen; gebruik nooit leidingwater. Afspoelen van de schijf is ook noodzakelijk om vuilresten te verwijderen, die indien nog aanwezig op de schijf, de neutralisatie van de MonoSept-vloeistof kunnen beïnvloeden. De lenshouder en schijf laten drogen aan de lucht (niet drogen met een doek).

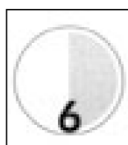

WAARSCHUWINGEN

- Geen andere lensverzorgingssystemen gebruiken, ook als het peroxidesystemen zijn. Gebruik altijd de onderdelen van het EYEEYE MonoSept-systeem.
- Let goed op dat u geen lenzen in het oog plaatst uit EYEEYE MonoSept-vloeistof die niet helemaal geneutraliseerd is. Ongeneutraliseerde EYEEYE MonoSept-vloeistof is een desinfecteringsproduct dat in het oog een branderig en sterk prikkend gevoel veroorzaakt.
- De geopende fles binnen 3 maanden verbruiken.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- De flacon bewaren tussen 5° en 25°C.
- Na gebruik de flacon direct sluiten.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Indien per ongeluk EYEEYE MonoSept-vloeistof wordt ingenomen, direct grote hoeveelheden water drinken en uw huisarts raadplegen.
- Ingeval van aanhoudende klachten of oogirritatie; raadpleeg uw contactlensspecialist.
- **Belangrijk: Na iedere gebruikte flacon altijd een nieuwe platina neutralisatieschijf nemen.**
- Aanbevolen wordt na 3 maanden een nieuwe lenshouder en cup te gebruiken, om beide schoon en bacterievrij te houden.
- Vermijd regelmatig vingercontact met de platina schijf. Vingers kunnen vetsporen achterlaten zijn, waardoor de neutraliserende werking van de schijf kan verminderen.
- De geneutraliseerde oplossing in de lenscup is niet geconserveerd. Indien de lenzen langer dan 24 uur in de oplossing staan, is het aan te bevelen de lenzen wederom te desinfecteren.
- Indien u een oogmedicatie krijgt voorgeschreven, raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist alvorens u de medicatie gebruikt in combinatie met contactlenzen.

VERWISSELEN VAN DE PLATINA SCHIJF (alleen bij een 3-maands- of 6-maands-verpakking)

Zorg ervoor dat u handen schoon en vetvrij zijn. Plaats de platina schijf, volgens de hier afgebeelde tekening op de lenshouder. De bevestiging van de schijf aan de lenshouder dient plaats te vinden door het platte uiteinde van de lenshouder in het vlakke gedeelte van de binnenkant van de schijf te steken. Let goed op dat u de schijf niet tussen de twee puntjes van de binnenkant van de schijf aan de lenshouder bevestigt.

BIJWERKINGEN

Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen EYEEYE MonoSept-vloeistof niet gebruiken.

Handige tips voor een juist gebruik van de lenzen in combinatie met uw lenshouder:

- Aanbevolen wordt na 3 maanden een nieuwe lenshouder te gebruiken, zodat uw lenshouder schoon en bacterievrij blijft.
- Gooi de gebruikte vloeistof altijd direct weg. Vervolgens de lenshouder met EYEEYE MonoSept-vloeistof afspoelen (voor de desinfectie) en laten drogen aan de lucht **NIET** afdrogen met een doek.
- Vermijd gebruik van leidingwater op uw lenzen of in uw lenshouder. Bepaalde merken lenzen kunnen vervormen door in contact te komen met leidingwater.
- Indien de lenzen langer dan 24 uur in de oplossing staan, is het aan te bevelen de lenzen wederom te desinfecteren.

Verpakkingseenheden:

60 ml, 360 ml, een 3-maands- en een 6-maandsverpakking. Bij iedere verpakking wordt een EYEEYE MonoSept-lenshouder met platina schijf geleverd.