

# Blephaclean®

Dit product is een medisch hulpmiddel.  
Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.  
Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet u  
hem later opnieuw lezen.

## INDICATIES

BLEPHACLEAN is geïndiceerd voor de dagelijkse hygiëne van de oogleden.  
Uitsluitend voor gebruik op de huid, niet rechtstreeks in de ogen aanbrengen.

## GESCHIKT VOOR

- Volwassenen,
- Kinderen vanaf de leeftijd van 3 maand: Ouders of verzorgers dienen het product aan te brengen.

## CONTRA-INDICATIES

Gebruik BLEPHACLEAN niet bij allergie voor één van de bestanddelen (zie productbeschrijving).

Bij gebrek aan voldoende gegevens, gebruik BLEPHACLEAN niet indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij op aanraden van uw arts.

## PRODUCTBESCHRIJVING

BLEPHACLEAN is een steriel kompres, doordrenkt met een lotion, voor de dagelijkse hygiëne van de oogleden.  
De lotion bevat: Capryloylglycine, Natriumhyaluronaat, PEG 8, Poloxameer 184, Polysorbaat 20, Propyleenglycol, Hydrocotyle extract (propyleenglycol, Centella asiatica extract en water), Conserveermiddelvrij talgregulerend complex (propyleenglycol, Iris florentina wortel extract, zinksulfaat, alcohol, natriumhydroxide of zoutzuur en water), PEG 6 caprylzuur/caprinezuur glyceriden (d.i. macrogol 6 glycerol caprylocapraat), Dikaliumpyrofosfaat, natriumhydroxide Kaliumdiwaterstoffsafaat, Gezuiverd water. De kleur van het kompres kan variëren. Dit komt door het gebruik van natuurlijke plantenextracten en is volkomen normaal.

## VOORDEEL, FUNCTIE EN WERKINGSMECHANISME

BLEPHACLEAN is een steriel kompres voor de dagelijkse hygiëne van de oogleden, voornamelijk:

- Als u een gevoelige huid, oogleden of ogen hebt,
- Als u stof, pollen en afscheiding uit uw ogen dient te verwijderen. Dit kan deel uitmaken van de verzorging als u allergie of een infectie in de ogen hebt,
- Als u een ontsteking of infectie van de oogleden hebt zoals blepharitis, Meibomklierdysfunctie, ontstoken klierlijes ('strontjes') of een chalazion. Deze aandoeningen kunnen droge ogen symptomen veroorzaken zoals jeukende, zanderige, pijnlijke en/of rode ogen,
- Als u uw oogleden dient te reinigen voor een oogheelkundige ingreep zoals therapeutische inspuitingen in het oog (intravitale injecties), refractieve laserchirurgie (LASIK of PRK) en cataractoperatie. Omdat het goed wordt verdragen kan BLEPHACLEAN eveneens worden gebruikt na chirurgie, volgens het advies van de arts of zorgverlener.

BLEPHACLEAN reinigt en verwijdert stof, pollen en afscheiding van de oogleden. BLEPHACLEAN respecteert de huid rond de ogen en de natuurlijke bacteriële flora.

Het product is getest onder oftalmologisch toezicht.

## ALGEMENE AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

### DOSERING:

Voor een oogheelkundige ingreep, gebruik tweemaal per dag gedurende 5 dagen of zoals aanbevolen door uw arts of apotheker.

In de andere gevallen tweemaal per dag , 's ochtends en 's avonds, gedurende 3 weken en vervolgens eenmaal per dag gedurende 3 maanden of zoals aanbevolen door uw arts of apotheker. Sommige ooglid aandoeningen zijn chronisch en kunnen vereisen dat de ooglidhygiëne gedurende een langere periode wordt voortgezet.

Er is geen specifieke training vereist voor het gebruik van BLEPHACLEAN.

Indien u contactlenzen draagt , dienen deze verwijderd te worden vóór het gebruik van BLEPHACLEAN.

Was de handen grondig voor gebruik van de kompressen.  
Open het zakje (Figuur 1) en ontvouw het kompres dat erin zit; gebruik geen enkel voorwerp om het zakje te openen.



Figuur 1 : Openen van het zakje.

Wikkel het kompres rond de top van uw wijsvinger.  
Houd het oog gesloten en wrijf met het kompres voorzichtig over de oogleden en de aanzet van de wimpers (Figuur 2).  
Masseer zachtjes met kleine cirkelvormige bewegingen om korstjes, afscheiding en/of make-up te verwijderen.



Figuur 2: Reinigen van oogleden en wimpers.

Voor de spiegel trekt u voorzichtig het onderste ooglid met uw andere hand naar beneden. Vervolgens wrijft u zachtjes de wijsvinger met het kompres eromheen langs de rand van het ooglid (Figuur 3).



Figuur 3: Reinigen van ooglidranden.

Herhaal deze handeling ter hoogte van het andere oog en gebruik hiervoor een nieuw kompres.

Spelen na gebruik van BLEPHACLEAN kompressen is niet nodig.

## VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Controleer of de verpakking intact is voor het eerste gebruik: gebruik enkel indien het zakje ongeopend is.

Gebruik een kompres nooit meer dan één keer, omdat het dan misschien niet zo effectief is en besmetting kan veroorzaken. Contacteer een zorgverlener indien de symptomen erger worden of niet verbeteren.

## WAARSCHUWINGEN

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Zorg ervoor dat BLEPHACLEAN niet in de ogen komt; u kunt een branderig gevoel ervaren. Als dit gebeurt, spoel dan met steriel water of een zoutoplossing.

## BIJWERKINGEN

Volgende bijwerkingen met BLEPHACLEAN werden gemeld: brandend of jeukend gevoel gedurende enkele minuten na gebruik, roodheid of zwelling van de oogleden, roodheid van het oog, allergische reacties.

In dergelijke gevallen mogen contactlensdragers hun lenzen niet terugplaatsen.

Als u na het gebruik van dit product bijwerkingen of ongebruikelijke gewaarwordingen constateert, neem dan contact op met een zorgverlener en rapporteer de informatie aan de lokale distributeur, aan de fabrikant of aan uw lokale gezondheidsinstantie (zie contactgegevens aan het einde van de gebruiksaanwijzing).

## BEWAAR- EN VERNIETIGINGSVOORWAARDEN

Bewaren tussen 8°C en 25°C.

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of vochtigheid.

Het kompres onmiddellijk na gebruik weggoien.

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum die duidelijk is aangegeven op het zakje en de buitenverpakking.

De houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand, op voorwaarde dat de verpakking intact is en correct werd bewaard.

Het product op een verantwoorde manier weggoien en in overeenstemming met de lokale richtlijnen (het zakje dient te worden weggegooid als huishoudelijk afval, de buitenverpakking en de bijsluiter zijn recycleerbaar).

Uitgavedatum en versie van de gebruiksaanwijzing:

Ver. 5 08/2022

## Fabrikant:

Laboratoires Théa  
12 rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand  
Cedex 2 Frankrijk  
www.laboratoires-thea.com

## BE

Verdeler: Théa Pharma

Poortakkerstraat 91/0301. B-9051 Gent.

www.thea.be

Gezondheidsinstanties:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en

Gezondheidsproducten

Galilleelaan 5/03, 1210 Brussel

Tel: +3225248000 – Fax: +3225248120

e-mail: meddev@afmps.be – www.fagg-afmps.be

## LU

Verdeler: Théa Pharma

Poortakkerstraat 91/0301. B-9051 Gent.

www.thea.be

Gezondheidsinstanties: Ministère de la Santé

Villa Louvigny

Allée Marconi, L-2120 Luxembourg

Tel : +352 24785500

e-mail : info@ms.public.lu

## NL

Distributeur: Théa Pharma B.V., Nederland

Mollerusweg 82B

2031 BZ Haarlem

www.netherlands@theapharma.com

Gezondheidsinstanties: The Health Care Inspectorate

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Postbus 2680 3500 GR Utrecht

Tel: +31 88 120 50 000

e-mail: meldpunt@igz.nl – www.igz.nl

CE 0459

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES PRESENT SUR

L'EMBALLAGE

BEDEUTUNG DES PIKTOGRAMMS

BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN OP DE VERPAKKING

|  |                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fabricant<br>Hersteller<br>Fabrikant                                                                                                                     |
|  | Numéro de lot<br>Fertigungslosnummer, Charge<br>Lot nummer                                                                                               |
|  | Date de fabrication<br>Herstellungsdatum<br>Productiedatum                                                                                               |
|  | Date limite d'utilisation<br>Verwendbar bis<br>Vervaldatum                                                                                               |
|  | Limites de température<br>Temperaturbegrenzung<br>Temperatuurlimieten                                                                                    |
|  | Dispositif stérilisé par irradiation<br>Strahlen-sterilisiert<br>Gesteriliseerd door straling                                                            |
|  | Dispositif médical<br>Medizinprodukt<br>Medisch hulpmiddel                                                                                               |
|  | Consultez la notice<br>Gebrauchsanweisung beachten<br>Raadpleeg de gebruiksaanwijzing                                                                    |
|  | Usage unique<br>Nicht wieder-verwenden<br>Voor éénmalig gebruik                                                                                          |
|  | Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé<br>Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden<br>Niet gebruiken indien verpakking beschadigd is |
|  | Avertissement<br>Achtung<br>Voorzichtig                                                                                                                  |
|  | Conserver à l'abri de la lumière du soleil<br>Vor Sonnenlicht schützen<br>Buiten direct zonlicht bewaren                                                 |
|  | Craint l'humidité<br>Trocken aufbewahren<br>Droog bewaren                                                                                                |
|  | Référence catalogue<br>Artikelnummer<br>Catalogusnummer                                                                                                  |
|  | Identifiant unique de dispositif<br>Eindeutige Produktidentifizierung<br>Unieke apparaatidentificatie                                                    |