

BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution

**LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK**

Speciaal geschikt voor fluor siliconen acrylaat, siliconen acrylaat en vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen nadat de lenzen zijn gereinigd. Het is tevens geschikt voor PMMA (harde) lenzen.

OMSCHRIJVING: BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution is een special geformuleerde vloeistof voor harde, zuurstofdoorlatende (RGP) en harde contactlenzen. Het bevat een gepatenteerd, multi-polymeer comfort systeem dat de oppervlakte van de lens van een beschermend laagje voorziet. Het verzacht de lens bij het inzetten en onderhoudt en verbetert de lensbevochtiging gedurende de dag. Het gepatenteerde multi-polymeer systeem van BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution vermindert de wrijving van de lens op het oog en ooglid en verwijdert tegelijkertijd losse deeltjes die mogelijk discomfort of irritatie kunnen veroorzaken. Deze formule is special ontworpen om biocompatibel te zijn met uw ogen. Het bevat tevens een geoptimaliseerd conserveringssysteem dat effectief schadelijke organismes vernietigd op RGP en harde contactlenzen.

INHOUD:

Desinfectanten: polyaminopropyl biguanide (0.0005% w/v), chloorhexidine gluconaat (0.003% w/v), disodium edetate (0.05% w/v).

Overige bestanddelen: zouten en buffers, polyquaternium 10, cellulose viscosifier, polyvinyl alcohol, polyethyleen glycol derivaten.

GEBRUIKSAANWIJZING: Verwijder de verzegeling. Niet gebruiken indien de verzegeling van de fles ontbreekt of verbroken is. Om zeker te zijn van een juiste desinfectie, dienen alle hieronder genoemde stappen te worden opgevolgd:

STAP 1:

Was altijd uw handen voor u uw lenzen of uw ogen aanraakt.

STAP 2:

Reinig en verzorg uw contactlenzen volgens de instructies van uw contactlensspecialist.

STAP 3:

Plaats iedere lens in het eigen compartiment van de lenshouder en vul deze met een verse hoeveelheid BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution.

STAP 4:

Laat uw lenzen tenminste vier (4) uur in de vloeistof staan voor een juiste desinfectie voordat u ze weer inzet.

STAP 5:

Wanneer u de lenzen uit de lenshouder neemt, spoel nogmaals met verse vloeistof alvorens ze in te zetten.

STAP 6:

Altijd grondig de lenshouder reinigen met BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution en iedere dag aan de lucht laten drogen.

BELANGRIJK: Het is essentieel dat u de instructies van de verpakkingen en de gebruiksaanwijzingen van uw contactlensspecialist zorgvuldig opvolgt, met betrekking tot de zorg voor uw ogen en het juiste gebruik van uw contactlenzen en contactlensverzorgingsproducten.

- Nooit de vloeistof hergebruiken. Voor een optimale desinfectie, iedere dag alle vloeistof in uw lenshouder vervangen voordat u uw lenzen daarin plaatst.
- Nooit uw lenzen in reinigingsvloeistof bewaren.
- Vloeistof gebruiken vóór het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Ook al is de fles nog ongeopend, nooit gebruiken na de vervaldatum.
- Fles en vloeistof negentig (90) dagen na opening weggoien.
- Altijd de juiste hygiëneregels en handelingstechnieken gebruiken. Bij verkeerd handelen kunnen contactlenzen en contactlensvloeistoffen makkelijk besmet raken met veel voorkomende bacteriën.
- Voorkom dat deze vloeistof in contact komt met kleding of handdoeken: dit kan vlekken geven.

WAARSCHUWING:

- Deze vloeistof is niet geschikt voor gebruik met zachte contactlenzen.
- BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
- Niet gebruiken indien verzegeling ontbreekt of verbroken is.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

ALS U LAST HEEFT VAN DISCOMFORT OF PIJN, OVERMATIG TRANEN, VERANDERING IN HET GEZICHTSVERMOGEN OF ROODHEID, NEEM DAN ONMIDDELLIJK UW LENZEN UIT EN RAADPLEEG UW CONTACTLENSPECIALIST.

VERKRIJGBAARHEID: BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution is verkrijgbaar in steriele flessen van 120ml en 30ml. Iedere fles is voorzien van een zogenaamd lot number en een houdbaarheidsdatum.



Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, NY 14609, U.S.A.



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston upon Thames, KT2 6TN, UK

C € 0050



Made in Italy

Boston Advance is een handelsmerk van Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated.

BAUSCH+ LOMB BOSTON ADVANCE™ Cleaner

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Speciaal geschikt voor fluor siliconen acrylaat, siliconen acrylaat en vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen.

OMSCHRIJVING: Dagelijks gebruik van BAUSCH+LOMB BOSTON ADVANCE™ CLEANER voorkomt de opbouw van hardnekkige vuilafzetting, wat het draagcomfort van harde zuurstofdoorlatende lenzen vermindert. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met BAUSCH+LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution

INHOUD: Actief bestanddeel: Alkyl sulfaat surfactant (8.0 % w/v).
Overige bestanddelen: Sodium chloride, Sodium fosfaat, non ionische alcohol surfactant, silica gel suspensie; bevat titanium dioxide.

GEBRUIKSAANWIJZING: Verwijder de verzegeling. Niet gebruiken indien de verzegeling van de fles ontbreekt of verbroken is. Om zeker te zijn van een juiste desinfectie, dienen alle hieronder genoemde stappen te worden opgevolgd:

STAP 1:

Was altijd uw handen voor u uw lenzen of uw ogen aanraakt.

STAP 2:

Leg de lens in de palm van uw hand en doe enkele druppels BOSTON ADVANCE™ CLEANER op de lens. Wrijf vervolgens gedurende 20 seconden.

STAP 3: Verwijder elk restant van de BOSTON ADVANCE™ CLEANER door de lens zorgvuldig af te spoelen, conform de aanwijzingen van uw contactlensspecialist.

STAP 4:

Plaats de lens in de lenshouder en vul deze met verse BOSTON ADVANCE™ COMFORT FORMULA CONDITIONING SOLUTION. Laat de lenzen tenminste 4 uur (of gedurende de hele nacht) in de vloeistof staan voor u ze weer inzet.

INDIEN DE CLEANER PER ONGELUK TOCH IN CONTACT KOMT MET HET OOG, ONMIDDELLIJK DE LENS UITNEMEN EN HET OOG UITSPOELEN MET SCHOON, STROMEND KRAANWATER TOTDAT ALLE CLEANER IS VERDWENEN. ALS U LAST HEEFT VAN DISCOMFORT OF PIJN, OVERMATIG TRANEN, VERANDERING IN HET GEZICHTSVERMOGEN OF ROODHEID, NEEM DAN ONMIDDELLIJK UW LENZEN UIT EN RAADPLEEG UW CONTACTLENSPECIALIST.

BELANGRIJK:

- Nooit de vloeistof hergebruiken.
- **ALTIJD UW LENZEN BEWAREN IN CONDITIONING SOLUTION. NOOIT UW LENZEN BEWAREN OF LATEN STAAN IN CLEANER. ALTIJD GRONDIG UW LENZEN AFSPOELEN (VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN UW CONTACTLENSPECIALIST) NA HET REINIGEN MET CLEANER EN VOORDAT U ZE VERZORGT MET CONDITIONING SOLUTION.**

- De opening van de fles niet met iets in aanraking brengen, dit kan de vloeistof verontreinigen.
- Fles goed gesloten houden tussen gebruik door.
- Was altijd uw handen voor u uw lenzen of uw ogen aanraakt.
- Gebruiken vóór verstrijken houdbaarheidsdatum welke op de fles staat.

WAARSCHUWING:

Buiten bereik van kinderen houden.

Niet gebruiken na verstrijken houdbaarheidsdatum.

Niet gebruiken indien verzegeling ontbreekt of verbroken is.

Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

Resterende vloeistof 3 maanden na opening weggooien.

NIET GEBRUIKEN VOOR ZACHTE CONTACTLENZEN.

VERKRIJGBAARHEID:

BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ CLEANER is verkrijgbaar in een steriele 30 ml en 10 ml fles.

De fles is voorzien van een uiterste vervaldatum en een lotnummer.



Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, NY 14609, U.S.A.



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston upon Thames, KT2 6TN, UK

C E 0050



Made in Italy

Boston Advance is een handelsmerk van Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated.